



Oreille et Vie, Association des Malentendants et Devenus Sourds du Morbihan

Maison des Associations boîte 62 5 Place Louis Bonneaud 56100 LORIENT

tél : 02 97 64 30 11 (Lorient)

n° SIRET 420 954 109 00039

E-mail : oreille-et-vie@wanadoo.fr Site Internet : <http://www.oreilleetvie.org>

Membre du BUCODES, Bureau de Coordination des Associations de DEvenus Sourds et malentendants, d'utilité publique

Les boucles d'induction magnétique de comptoir

Dites aussi boucles portables

Ce sont des systèmes simples à installer permettant l'accessibilité des accueils des Etablissements Recevant du Public pour les personnes malentendantes, appareillées ou non.

Ces systèmes sont universels : les champs magnétiques induits ont tous les mêmes caractéristiques (pas de problème de canal).

Leur utilisation facilite les échanges entre les hôtes et hôtesse d'accueil et les personnes malentendantes.

Principe

La parole du locuteur est captée par le micro, transformée en courant électrique qui passe dans un conducteur conçu pour créer un champ magnétique (peu intense) en phase avec la parole. Ce champ rayonne dans une sphère de 1 m à 1m 20 de rayon.

Pour qui ?

Pour toute personne ayant des difficultés auditives et comprenant la parole directement ou grâce à des appareils auditifs (appareils classiques ou implants).

Comment cela fonctionne ?

- L'appareil doit être branché au secteur ou intégrer une batterie chargée et allumé.

- Un micro est connecté au boîtier : un micro sur pied est fourni avec le système.

Certains modèles ont un micro intégré mais omnidirectionnel : il capte donc tous les bruits, ce qui perturbe la bonne compréhension. Ce système est à écarter.

Le locuteur doit utiliser le micro.

Que doit faire la personne malentendante ?

Elle a deux possibilités :

- Si elle porte des appareils auditifs avec programme « T » ou « M/T » elle active ce programme : rien ne se voit pendant l'échange mais le dialogue est facilité.

- Si elle ne porte pas d'appareils auditifs ou si ses appareils n'ont pas de programme « T » elle utilise l'écouteur branché au boîtier.

Il faut donc privilégier les boucles portables **avec écouteur** car elles sont utilisables par le plus grand nombre de personnes.

Conseil aux responsables de bureaux équipés d'une boucle magnétique de comptoir :

- S'assurer que l'appareil est branché ou chargé,

- S'assurer que tous les accueillants en connaissent le fonctionnement et l'utilité.

Sans ces conditions la boucle ne sera d'aucune utilité pour les malentendants.

Attention : une boucle portable de comptoir n'est pas conçue pour équiper une salle de réunion ou de conférence. Il faut alors s'orienter vers un produit adapté à cet usage.